



Manual de la app

La app móvil de PROCER Smart Glasses, explicada pantalla por pantalla.



Este mismo manual existe como tutorial interactivo narrado por voz.
Escaneá el código o entrá a:
glasses.procertecnologias.com/tutorial

Sobre este manual

Este manual recorre la app de PROCER Smart Glasses en el mismo orden en que la vas a usar: ingresar con tu cuenta, vincular los lentes, y las cuatro funciones del menú principal. Cada capítulo muestra la pantalla y explica qué hace cada cosa.

Toda la app se puede manejar con VoiceOver o TalkBack, con las tarjetas grandes de alto contraste, o directamente sin tocar nada usando la palabra clave “hey Prócer”.

Este PDF es accesible: todo el contenido es texto real y las imágenes tienen descripción.

Contenido

1. **Iniciar sesión** — La cuenta que maneja tus lentes
2. **Vincular los lentes** — Se conectan solos por Bluetooth
3. **El menú principal** — Cuatro funciones, nada más
4. **Hey Prócer** — Manos libres, sin tocar el teléfono
5. **Asistente** — Conversación y consulta al material
6. **Leer documento** — Lectura accesible de PDFs y apuntes
7. **Importar material** — Del teléfono y de los lentes a tu biblioteca
8. **Ajustes** — Cambiar lentes, idioma y ayuda hablada

CAPÍTULO 1


Iniciar sesión

La cuenta que maneja tus lentes

Arrancamos por el ingreso. PROCER usa una cuenta propia: con ella se sincroniza tu biblioteca entre el teléfono y los lentes.

Escribimos el correo y la contraseña.

Listo. Como todavía no hay lentes vinculados, la app va directo a la pantalla de vinculación.

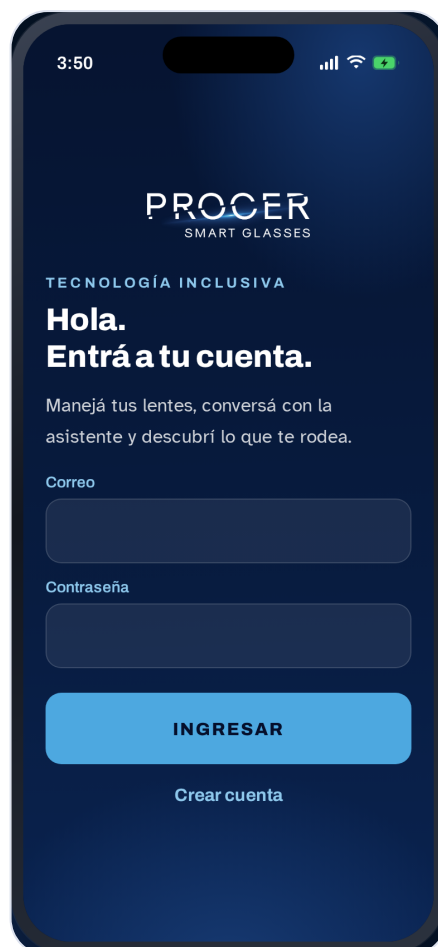

Vincular los lentes

Se conectan solos por Bluetooth

Acá la app busca lentes cercanos por Bluetooth. Los lentes PROCER aparecen solos en la lista, sin que tengas que configurar nada.

Aparecieron dos pares. La app indica cuál es el que tenés más cerca — elegimos ese.

La app se conecta con los lentes. Por esa conexión viajan tus pedidos y lo que escucha el micrófono de los lentes.

Y enseguida pide un segundo permiso, el que deja sonar las respuestas en los parlantes de los lentes. Vinculado: la cuenta queda activada.



El menú principal

Cuatro funciones, nada más

Este es el menú. Está pensado para que se entienda de memoria: cuatro tarjetas grandes, siempre en el mismo orden, siempre en el mismo lugar.

Arriba, la barra de estado de los lentes: el punto verde dice que están conectados, y al lado va la batería. Tocándola se abren los ajustes.

Cada tarjeta es bien grande, y se puede mantener apretada para escuchar en voz alta qué hace. Con VoiceOver la ayuda aparece en el rotor de acciones.

Hey Prócer, Asistente, Leer documento e Importar material. Vamos una por una.



Hey Prócer

Manos libres, sin tocar el teléfono

Esta es la función central: el teléfono queda en el bolsillo y todo se maneja con la voz.

El círculo celeste late porque el detector de palabra clave está escuchando. Funciona con la pantalla apagada y consume muy poco.


Decimos "hey Prócer" y el micrófono de los lentes se abre. Ojo con el detalle: graba el micrófono de los lentes, no el del teléfono.

Como la pregunta es sobre el entorno, la app saca una foto con la cámara de los lentes y la pasa al teléfono.

Mientras la foto se analiza, contesta algo corto para que no haya silencio: para alguien que no ve, el silencio es una app colgada.

La respuesta se lee en voz alta por los parlantes de los lentes, partida en frases. Con los botones de abajo se repite una frase, se retrocede o se adelanta.

Y lo importante: mientras habla, el detector sigue activo. Podés cortarlo en cualquier momento diciendo "hey Prócer" de nuevo. Eso es lo que hace que sea de verdad manos libres.

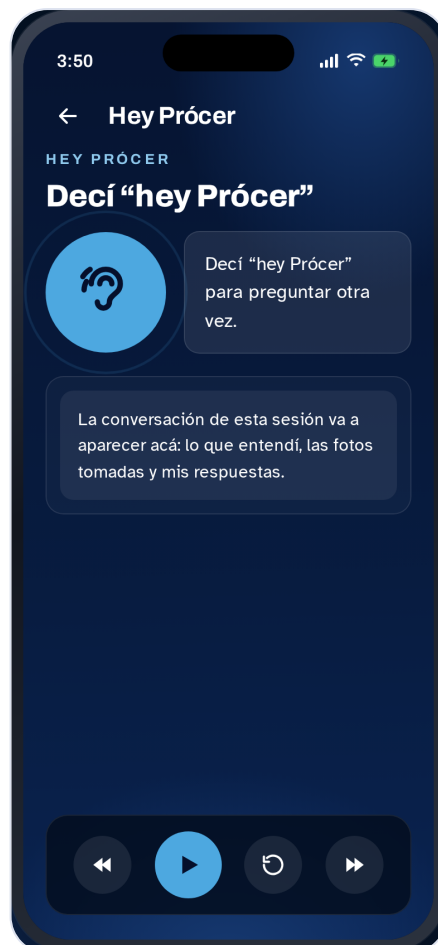

Asistente


Conversación y consulta al material

El Asistente es la misma inteligencia, pero en modo conversación, con historial y con acceso a todo lo que subiste a tu biblioteca.

La respuesta no es una respuesta genérica de internet: primero busca en tus documentos y después contesta citando de dónde salió.

Fijate que aclara la fuente. Para estudiar, saber de qué apunte salió cada cosa vale tanto como la respuesta.

Abajo hay tres accesos: adjuntar un archivo, sacar una foto y dictar por voz. Todo lo que se puede escribir se puede hablar.

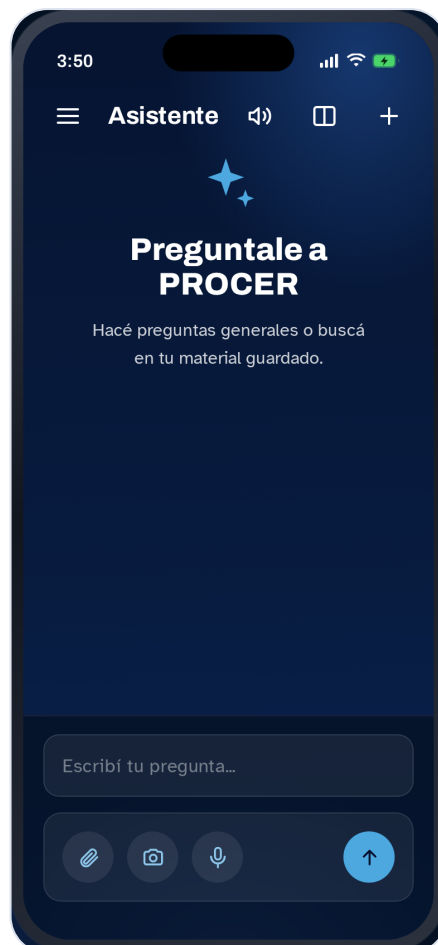

Leer documento

Lectura accesible de PDFs y apuntes

Leer documento abre un archivo del teléfono y lo lee en voz alta. Sirve para PDF, texto, Word, EPUB y RTF.

Extrae el texto y lo parte en frases y párrafos, así se puede navegar de a poco en vez de escuchar un bloque de veinte minutos.

Abajo está tu biblioteca. Podés buscar escribiendo, o tocar "Buscar con la voz" y decirlo, que es lo que usa la mayoría.

El botón con las estrellitas hace una búsqueda por contenido: no busca el título, busca adentro de lo que dice cada material.

Y al final aparecen las capturas de los lentes: cada foto que sacaste queda con su texto reconocido, lista para que te la lea.



Importar material


Del teléfono y de los lentes a tu biblioteca

Importar material es lo que alimenta a la biblioteca. Hay dos caminos: subir un archivo del teléfono, o traer las fotos guardadas en los lentes.

Para traer las fotos, los lentes y el teléfono se conectan directo entre sí por un momento: es la forma rápida de pasar muchas fotos. Es automático, no hay que configurar nada.

Cuando terminan de bajar, el teléfono vuelve solo a tu conexión de siempre y las fotos se suben a tu biblioteca.

Y después pregunta si querés borrarlas de los lentes para liberar espacio. Nunca borra sin preguntar.

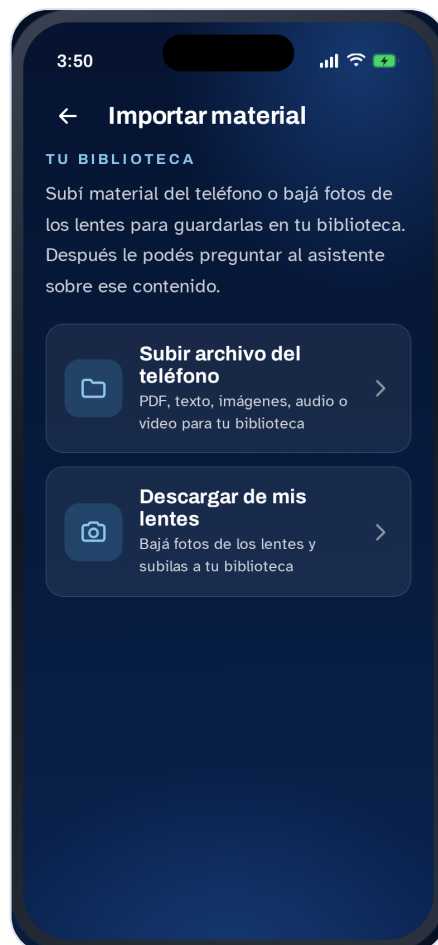


Ajustes

Cambiar lentes, idioma y ayuda hablada

En ajustes se cambia el par de lentes vinculado, se desvincula, y se prende o apaga la ayuda hablada.

El idioma cambia toda la app y también la voz con la que te responde. Está en castellano y en inglés.

Y ese es el recorrido completo. Toda la app se puede manejar con VoiceOver, con las tarjetas grandes, o directamente sin tocar nada usando "hey Prócer".

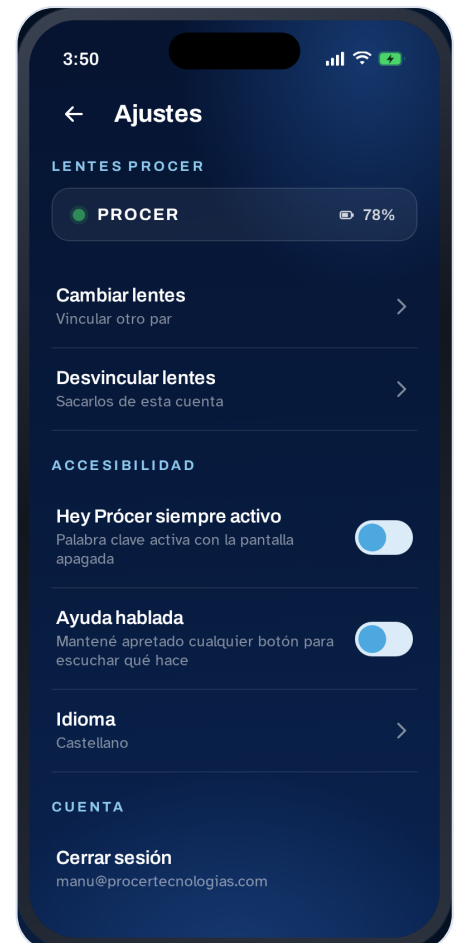

¿Necesitás ayuda?

Escribinos y te acompañamos con la puesta en marcha.

info@procertecnologias.com · +54 9 351 421 3816

glasses.procertecnologias.com



PROCER Tecnologías SAS · procertecnologias.com